

Nelli® Usein kysytyt kysymykset

Kuinka Nelli® toimii?

Järjestelmä tunnistaa kohtaukset (ja muut poikkeavat liikkeet) ja kirjaa ne lääkärin raporttiin.

Mihin tiedot tallennetaan?

Kaikki tiedot tallennetaan paikallisesti. Vain epileptisiä tapahtumia ja kohtauksia sisältävät tiedot lähetetään ja varastoidaan Nelli® pilvipalveluun analysoitavaksi. Kaikki tiedot ovat tiukasti suojattuja tallennettaessa ja niitä siirrettäessä.

Voiko joku hakkeroida järjestelmän?

Suhtaudumme turvallisuuteen hyvin vakavasti. Kaikki toimenpiteet toteutetaan, jotta näin ei tapahdu.

Täytyykö järjestelmä yhdistää Internetiin WIFI: llä tai kaapelilla?

Ei, järjestelmä yhdistyy automaattisesti internetiin sisäänrakennetun modeemin kautta.

Kuka voi nähdä videon?

Ainoastaan Neuro Event Labsin nimeämät asiantuntijat saavat katsella tallennuksia löytöjen tarkastelemiseksi ja niiden vahvistamiseksi sekä raportin tarkkuuden parantamiseksi. Raportti toimitetaan lääkärille. Raportti sisältää vain kohtaukset tai muut lääketieteelliset löydökset.

Onko videokamera päällä koko ajan?

Tallennusta ohjaa potilas tai hänen hoitajansa. Nauhoitus tallentuu vain, kun algoritmi tunnistaa tai havaitsee mahdollisen epileptisen tapahtuman.

Pitäisikö minun yrittää mennä sänkyyn, jos tunnen kohtauksen tulevan päivän aikana?

Nelli® tunnistaa ainoastaan kohtaukset, joita tapahtuu, kun nukut tai makaat sängyssä tavallisen rytmisi mukaan. Mutta jos tunnet kohtauksen olevan tulossa ja pystyt makaamaan sängyssäsi, se olisi erittäin hyödyllistä.

Kamera on sänkyä vieressä. Onko se meluisa?

Siitä voi kuulua hiljainen ääni, kuten kannettavasta tietokoneesta.

Voinko poistua sängystä esim. vessaan tallennuksen aikana?

Kyllä voit poistua vuoteesta hetkeksi tarvittaessa. Vuoteesta poissaolon aikana ei tehdä löydöksiä, mutta se ei häiritse myöskään tallennusta tai analyysijä.